

Bioclin

Serviço de Assessoria Científica - 0800-315454

PROGRAMAÇÃO PARA HITACHI 911 ®

HDL DIRETO

Catálogo: K.071

Número de Testes: 500

HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários.

Preparação e estabilidade do reagente de trabalho: utilizar as instruções de uso.

Test	[HDL] [*****]	Test Name	[HDL]	Unit	[MG/DL]
Data Mode	[ON BOARD]	Report Name	[HDL DIRETO BIOCLIN]		
Control Interval	[]	Instrument Factor (Y =aX+B) a	[1.0]		
			B	[0]	
Expected Value	< serum >			Expected Value < urine >	
Age	(M)	(F)		[-99999] - [99999]	
[100] [Y]	[0] - [99999]	[0] - [99999]			
[100] [Y]	[0] - [99999]	[0] - [99999]			
	[35] - [55]	[35] - [65]			
Tecnichal Limit	< serum >	< urine >			
	[0] - [200]	[-99999] - [99999]			
STD	POS	SAMPLE	PRE	DIL	CALIB LOT. NO. [QUALITATIVO] [NO]
(1) 0.0	18	[3]	[0]	[0]	[Cod Salina] 0000000 (1)
(2) **	**	[3]	[0]	[0]	[cod. Calib.] 0000000 (1)
(3) 0			[0]	[0]	[***] 0000000
(4) 0			[0]	[0]	[***] 0000000
(5) 0					
(6) 0					
TEST	[HDL]				
ASSAY CODE	[2POINT END] [10] []			WAVELENGTH (2 END / PRIMARY)	[700] [546]
ASSAY POINT	[15] - [31] - [0] - [0]			DILUENT/ RGT. STABILITY	[W] [99]
	<SERUM >			<URINE>	
S. VOL. (NORMAL)	[3] [0] [0]			[10] [0] [0]	
S. VOL. (DECREASE)	[2] [0] [0]			[10] [0] [0]	
S. VOL. (INCREASE)	[6] [0] [0]			[10] [0] [0]	
ABS LIMIT	[]			[0]	[INCREASE]
PROZONE LIMIT	[0]			[]	[LOWER]
REAGENT	T1 [120] [0] [*****]				
	T2 [0] [0] [*****]				
	T3 [40] [0] [*****]				
	T4 [0] [0] [*****]				
CALIBRATION TYPE	[LINEAR] [2]			[2] [0]	
AUTO TIME OUT	BLANK [0]			SD LIMIT	[0.1]
	SPAN [0]			DUPLICATE LIMIT	[500]
	2 POINT [0]			SENSYTIVITY LIMIT	[0]
	FULL [0]			S1 ABS LIMIT	[-32000] [32000]
				COMPENSATED LIMIT	[]

Rev. Set/2008