

Bioclin

SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA EQUIPAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO

L001

INSTRUÇÕES DE USO

FINALIDADE

Solução detergente para a limpeza de cubetas de fluxo contínuo de analisadores bioquímicos semi-automáticos.

Indicado para:

Aparelhos bioquímicos semi-automáticos.

Aplicação:

A limpeza atua removendo gorduras, proteínas e outros produtos que ficam depositados nas tubulações e paredes das cubetas de fluxo contínuo.

A limpeza interna das cubetas proporciona resultados com melhor precisão e reprodutibilidade, eliminando problemas de bolhas internas e obstrução do caminho óptico.

SOLUÇÃO

Solução detergente – conservar entre 15 e 30°C

Contém: 2-Butoxietanol < 10% e Hidróxido de Sódio < 5%.

APRESENTAÇÃO

Embalagem	Apresentação
1	1 x 20 mL
2	1 x 50 mL
3	2 x 50 mL
4	4 x 50 mL
5	1 x 500 mL

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

A temperatura de armazenamento e transporte poderá ser de 15 a 30°C. Manter ao abrigo da luz e evitar umidade.

CUIDADOS ESPECIAIS

- 1 - Seguir com rigor a metodologia proposta para a obtenção da limpeza adequada;
- 2 - A água utilizada na limpeza do material deve ser recente e isenta de contaminantes;
- 3 - Evitar contato com os olhos e pele; Em caso de contato lavar imediatamente com água em abundância.
- 4 - Usar luvas de laboratório quando manusear o produto;
- 5 - O produto pode ser nocivo se ingerido ou inalado, em caso de ingestão procurar socorro médico;
- 6 - O descarte do material utilizado deverá ser feito obedecendo-se os critérios de biossegurança de acordo com a legislação vigente.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

A solução de limpeza encontra-se pronta para uso.

Diariamente após o final da rotina, aspirar a solução de limpeza e em seguida desligar o aparelho, deixando a solução na cubeta durante a noite. Antes de utilizar o equipamento lavar a cubeta com água deionizada, enxaguando por no mínimo cinco vezes.

A metodologia de uso pode variar de acordo com o analisador. Para maiores informações vide o manual do fabricante do equipamento.

ESTABILIDADE

Foram avaliados 3 lotes do produto Solução de Limpeza para equipamento Semi-Automático Bioclin durante o prazo de validade estabelecido e não foram verificados crescimento microbiológico, nem perda das características físico-químicas, permanecendo o desempenho do produto estável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 - QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.

GARANTIA DE QUALIDADE

Antes de serem liberados para o consumo, todos os reagentes **Bioclin** são testados pelo Departamento de Controle de Qualidade. A qualidade dos reagentes é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem de apresentação, desde que armazenados e transportados nas condições adequadas.

DADOS DO FABRICANTE

QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda
Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: (31) 3439.5454 - Fax (31) 3439.5455
e-mail bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Serviço de Assessoria ao Cliente Tel.: 0800 0315454.
e-mail: sac@bioclin.com.br

Número de Registro da Solução de Limpeza para Equipamento Semi-Automático na ANVISA: 10269360204

Revisão: Abril/11